


Kurzgebrauchsanweisung

Vorbereitung

- » Reinigen Sie die vor der Anwendung die Haut, sie muss sauber und fettfrei sein.
- » Schließen Sie an die Elektrodenstecker eines Kabels die benötigten Elektroden an (siehe Programmbeschreibung).
- » Stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen der beiden Ausgänge an der Unterseite des Phalli Max.
- » Platzieren Sie nun die Elektroden wie in der Programmbeschreibung angegeben.

Einschalten des Phalli Max


Der Schiebeschalter muss auf der Position ON stehen, damit Sie den Phalli Max einschalten können. Schalten Sie das Gerät über die -Taste ein.

Programm 1 (Abb. 1)

Bestreichen Sie die Schlingenelektrode mit Elektrodengel, und legen Sie sie um den Penis, etwas unterhalb der Eichel. Ziehen Sie die Schlinge zu, so dass die Elektrode gut anliegt, aber nicht einschnürt. Verbinden Sie ein Ende der Schlingenelektrode mit dem roten Kabelstecker.

Die Selbstklebelektrode (50 x 50 mm) platzieren Sie oberhalb der Peniswurzel auf den Unterbauch. Verbinden Sie sie mit dem blauen Kabelstecker.


Stellen Sie die Intensität so ein, dass sie deutlich spürbar ist, aber keine Schmerzen verursacht.

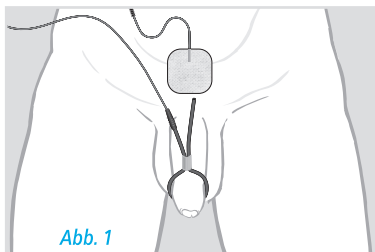

Programm 2 (Abb. 2)


Kleben Sie die Elektroden seitlich in Längsrichtung auf den Penischaft auf (Kabelanschluss nach Belieben).

Stellen Sie die Intensität so ein, dass sie deutlich spürbar ist, aber keine Schmerzen verursacht.

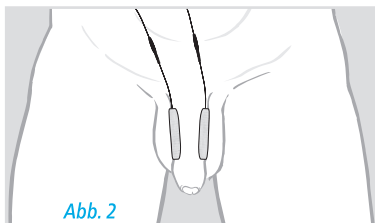

Programm 3 (Abb. 3)

Für das Beckenbodentraining wird die mit dem blauen Kabelstecker verbundene Elektrode auf den Damm geklebt. Die mit dem roten Kabelende verbundene Elektrode wird oberhalb des Schambeinknochens angebracht. Stellen Sie die Intensität so ein, dass sie deutliche Muskelzuckungen im Bereich des Damms hervorruft.

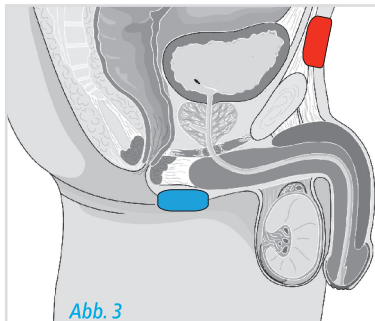

Kurzgebrauchsanweisung

Starten der Stimulation

Wählen Sie das gewünschte Programm durch Drücken der **P**-Taste aus. Starten Sie die Stimulation mit der **▶**-Taste des Kanals, an dem Sie das Kabel angeschlossen haben.

Regeln der Intensität

Regeln Sie die Intensität mit den **◀▶**-Tasten des Kanals, an dem Sie das Kabel angeschlossen haben.

Pausieren der Stimulation

Drücken Sie bitte auf die **E**-Taste, um die Stimulation zu pausieren. Um fortzufahren, drücken Sie erneut **E**.

Beenden der Stimulation

Halten Sie die **○**-Taste oder die **P**-Taste für eine Sekunde gedrückt oder verringern Sie die Intensität auf null, um die Stimulation zu beenden.

Ausschalten des Gerätes

Drücken Sie bei gestoppter Stimulation auf die **○**-Taste, um das Phalli Max auszuschalten.



schwa-medico
MENSCHLICHE MEDIZIN

DEUTSCHLAND schwa-medico Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Str. 41 - 43 | 35630 Ehringshausen | Tel. 06443 8333-110
Fax 06443 8333-119 | info@schwa-medico.de | schwa-medico.de

ÖSTERREICH schwa-medico Handelsgesellschaft m.b.H. | Industriezeile 25
5280 Braunau | Tel. 07722 66122 | Fax 07722 66123 | info@schwa-medico.at
schwa-medico.at



Pierenkemper GmbH | Am Geiersberg 6 | 35630 Ehringshausen
Deutschland **CE0482**